

SALTAIR UV -LAITTEEN KÄYTTÖOHJEET

Lue ohjeet huolella ennen laitteen käyttöönottoa. Sulkeissa numerot viittaavat osiin, josta kuvitukset laitteen mukana tulevassa ohjevihkosessa.

1. Aseta laite **tasaiselle, vakaalle ja kuivalle alustalle**, jossa sitä käytetään (esim. yöpöytä). Poista yläkansi ja donitsin muotoinen vesisuojuus. Katso KUVA 1. Kytke verkkolaite alustaan. KUVA 2.
2. Lisää vesisäiliöön 300 ml vettä laitteen mukana toimitetun mittakupin avulla. KUVA 3.
3. Liuota 0,5 tl suolaa yhdessä mittakupillisessa vettä ja kaada liuos vesisäiliöön. Lisää vettä enintään säiliön 500 ml:n MAX-tasoon asti! **Älä koskaan ylitä esimmäistasoa.** KUVA 4.
4. Aloita suosittelulla 0,5 tl:lla suolaa ja lisää määrää tarvittaessa seuraavalla käyttökerralla (max.1 tl/säiliöllinen vettä). Säiliöön saa laittaa kerralla **maksimissaan 1 tl suolaa!** Älä ylitä annostusta. **NÄIN LAITE PYSYY PITKÄIKÄISEMPÄNÄ.**
5. Pyyhi vesisäiliön ulkopinnalle roiskunut vesi esim. talouspaperilla ja aseta donitsin muotoinen vesisuojuus säiliöön ja yläkansi takaisin paikoilleen. KUVA 5
6. Kytke virtajohto pistorasiaan. KUVA 6
7. Paina laitteen ON/OFF -painiketta. Virran merkkivalo palaa ”päällä” ja laite alkaa toimia. Mikroskooppiset suolahiukkaset tulevat laitteesta yläaukon kautta. Sitä ei ole helppo silmin havaita - ja se on täysin normaalia. Tunnet vain kevyen ilmavirran, joka tulee laitteesta ulos. KUVA 7.
8. AJASTIN (TIMER-painike): Voit asettaa laitteen toimimaan 3 h/6 h/9h/ON (päällä)/pois päältä. KUVA 8.
9. VALO (LIGHT-painike): Voit asettaa painikkeesta UV-valon voimakkuuden kahteen eri voimakkuuteen. UV-valo steriloi veden kaikista bakteereista tai homeista. Voit käyttää toimintoa samalla kun käytät laitetta tai erikseen laitteen ollessa sammutettuna. KUVA 9.
10. Laite pysähtyy automaattisesti kun säiliössä ei ole enää suolaliuosta. Odota, että vesisäiliö tyhjenee noin 5-9 yössä. Täytä tankki jatkaaksesi käyttöä. **Varmista, että laite ei ole kytkettynä säiliön täytön aikana.**
11. **ÄLÄ KOSKAAN** kallista tai siirrä yksikköä tai poista yläkantta sen jälkeen kun vesisäiliö on täytetty tai laite käytössä.
12. Jos vesisäiliössä ei ole vettä, ON/OFF -painikkeen painaminen saa laitteen äänimerkin muistuttamaan sinua lisäämään vettä. Laite ei toimi ilman vettä!

HUOLTO, PUHDISTUS JA VARASTOINTI

1. Irrota laite pistorasiasta ja poista yläkansi.
2. Kaada jäljellä oleva vesi pois säiliön DRAIN SIDE -sivulta varmistaen, että vettä ei pääse ilmanpoistoaukkoon (AIR OUTLET). Puhdista vesisäiliö jokaisen täytön yhteydessä veteen kostutetulla pehmeällä puhdistusliinalla.
3. Puhdista ultraäänikemmo **varovasti** (pieni pyöreä, valkoinen kappale vesisäiliön pohjassa) pehmeällä veteen kostutetulla puhdistusliinalla tai vanupuikolla. **Huom! Älä koskaan kosketa ultraäänikemmoa terävien tai kovien esineiden kanssa.**
4. Mikäli laitteeseen on kertynyt kalkkikerrostumia, voit puhdistaa vesisäiliön ja ultraäänikemmon etikkavesi-liuokseen (1/4 etikkaa ja 3/4 vettä) tai sitruunahappo-vesiliuokseen (1 rkl sitruunahappoa kupilliseen vettä) kostutetulla rätillä. Pyyhi säiliö puhdistamisen jälkeen puhtaalla, lämpimään veteen kostutetulla liinalla ja kuivaa lopuksi esim. talouspaperilla. Tämän voit tehdä 2-3 kuukauden välein tai aina tarvittaessa. **Älä käytä puhdistamiseen muita puhdistusaineita**, jotka voisivat aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriöitä.
5. Yläkannen sisäpuolella on ”sisäkansi”, joka on mahdollista irrottaa puhdistusta varten. Ote hyvä ote sisäkannesta ja vedä se ulos. Puhdistuksen jälkeen aseta ensin ilmanpoistoaukon puoli paikoilleen ja paina sen jälkeen vastakkaiselta puolelta sisäkansi kiinni, kunnes kuulet napsahduksen.
6. Varastointi: Ennen varastointia puhdista laite huolellisesti ohjeiden mukaan. Laita kuiva laite alkuperäiseen pakkaukseen ja säilytä sitä viileässä tai huoneenlämpöisessä, kuivassa paikassa.

Mikäli laite kaatuu tai vuotaa vahingossa, toimi seuraavasti:

1. Sammuta laitteen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta toiminnan lopettamiseksi turvallisesti.
2. Poista kansi ja kaada jäljelle jäänyt vesi pois säiliöstä.
3. Kuivaa yksikkö kuivaksi ja anna sen kuivua 24 tuntia ennen käyttöä.

TÄRKEÄÄ LAITETTA KÄYTTÄESSÄSI!

- Laitteessa on käytettävä puhdasta valkoista Himalajan kristallisuolaa. LAITTEEN TAKUU EI OLE VOIMASSA, MIKÄLI SIINÄ KÄYTETÄÄN JOTAIN MUUTA SUOLAA (lisätietoja www.tuisa.fi).
- Älä täytä suolavesiliuosta säiliön MAX-merkin yli. **ÄLÄ KOSKAAN** täytä vettä säiliöön käytön aikana!
- SÄILIÖÖN SAA LAITTA A KERRALLA MAKSIMISSAAN 1 TL SUOLAA. **ÄLÄ YLITÄ ANNOSTUSTA.**
- Käytä ultraäänikemmon puhdistamiseen vain pehmeää kangasta tai vanupuikkoa. Älä koskaan kosketa sitä terävien tai kovien esineiden kanssa.
- **ÄLÄ KOSKAAN** upota alustaa veteen ja varmista, että vettä ei mene laitteen ilmanpoistoaukon (air outlet) tai muiden aukkojen läpi.
- Älä täytä vesisäiliötä yli 40 °C:n vedellä värimuutosten tai muodonmuutosten välttämiseksi.
- Vältä laitteen ylimääräistä siirtelyä käytön aikana. Kun laitetta kallistaa, suolavesi valuu herkästi ulos. Siirrä laitteen paikka vain täyttäjien yhteydessä.
- Älä käytä laitetta yli 10 tuntia kerrallaan. Odota 60 minuuttia ennen uudelleenkäynnistystä, jotta laitteen ultraäänikemmo ei vaurioidu.
- Älä sijoita tätä laitetta lähelle muita sähkölaitteita, jotka voivat vahingoittaa tai aiheuttaa vaaran mikäli suolaliuosta pääsee vahingossa vuotamaan.
- Kun laite ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa ja omassa pakkauksessaan.