



MultiEquipment. Ref F-331

Käyttöohjeet

4 IN 1

Kylmäkuuma vasarahoito
Korkeataajuuspää
Pyörivät harjaosat
Imulaite & suihkupullo

Varoitus

- Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen tarkastus on pakollinen, pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, saunatila jne.) välttääksesi vahingon syntymisen laitteen sähkökomponenteille.
- Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille sääolosuhteille voi aiheuttaa vahikoa laitteelle.
- Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, pyydämme ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.

EU- vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:
1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

Kierrätys



Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi normaalina sekajätteenä Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa säästämään luonnonvaroja ja parantaa luonnonsuojelun standardeja, koskien sähköjätteen käsittelyä.

Tervetuloa!

Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta. Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää ammattilaiselta opastusta laitteen oikeanlaisessa käytössä. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen vääräoppisesta käytöstä.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. Jos löydätte virheitä näistä ohjeista, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, jotta voimme korjata ne.



weelko
the wellnes
company

MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE


MYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique
Hoitolasi - 24/7 - Email
myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi

ETUPANEELI



Käyttöohjeet

1. Kytke virtajohto takapaneeliin.
2. Kytke tarvikkeet etu- ja takapaneeliin kuvan osoittamalla tavalla.

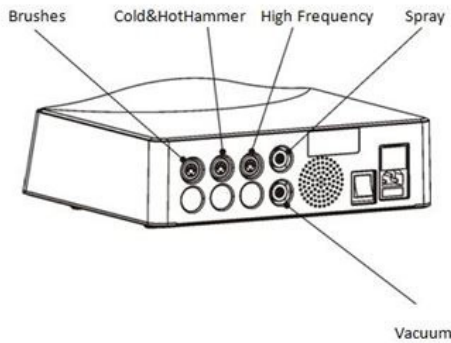

3. Paina "POWER" -painiketta.
4. Paina "FUNCTION" -painiketta valitaksesi haluttu toiminto. Toimintojen järjestys on seuraava: korkeataajuuspää, imulaite ja suihkupullo, pyörivät harjaosat, kylmäkuuma vasarahoito.

KORKEATAAJUUSPÄÄ

1. Valitse sopiva lasiputki ja syötä se metalliseen putken sisäänmenoon (yritä olla koskematta lasista osaa käsilläsi tai metallilla).

Lasisen putken asennon valinta:

- a. Sienen muotoista putkea käytetään isoihin ihoalueisiin: kasvat, otsa, kaula jne.
- b. Kauhamaista putkea käytetään keskikokoisille ihoalueille: leuka jne.
- c. Pallomaista putkea käytetään pienille ihoalueille: nenä jne.
- d. Suoraa putkea käytetään epäsuoraan hoitoon.

2. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.
3. Kosketa hoitoaluetta lasisella hoito-osalla. Voit hitaasti lisätä tehoa painamalla "ENERGY" -painiketta.
4. Mikäli vaihdat hoito-osaa hoidon aikana, aseta teho minimille ennen vaihtoa. Säädä teho tämän jälkeen sopivalle tasolle.
5. Vähennä tehoa hitaasti hoidon lopussa minimi tasolle asti. Ennen hoito-osan irrottamista hoidettavan kasvoista, paina "START/PAUSE" -painiketta.

Epäsuora hoito

1. Valitse suora putki ja syötä se hoito-osan metalliseen sisääntuloon.
2. Anna käsiosa hoidettavalle, varmistaen, että hoidettava ottaa kiinni lasiosasta, eikä käsiosasta.
3. Käännä laite päälle painamalla "START/PAUSE" -painiketta ja varmista, että teho on säädetty minimille.
4. Lisää tehoa hitaasti painamalla "ENERGY" -painiketta.
5. Suorita kasvohieronta tai hoito käyttäen hoitovälinettä oikealla tavalla. Varmista hoidon aikana, että et koske hoitopään lasiseen osaan hoidettavan kädessä.
6. Laske teho minimi tasolle hoidon loppuksi. Tämän jälkeen kytke laite pois päältä painamalla "START/PAUSE" -painiketta.

Huomioitavaa

- Jos lasiputki säkenöi, kun se on muutaman sentin päässä ihosta, laske laitteen tehoa. Mikäli asiakas tuntee edelleen säkenöinnin hän voi peittää kasvonsa pienellä, kuivalla puuvilla pyyhkeellä. Synteettistä tai nylonista pyyhettä ei pidä käyttää.
- Ennen kuin irrotat lasiputken hoidettavan ihosta vähennä teho minimiin painamalla "ENERGY" -painiketta. Tämän jälkeen kytke laite pois päältä.
- Hoidettavalla ei saa olla koruja tai metallia päällään hoidon aikana.
- Korkeataajuushoitoja ei saa tehdä raskaana oleville naisille tai henkilöille joille on sydämentahdistin (mikä tahansa laite, joka säätelee sydämen toimintaa).
- Korkeataajuuspään kanssa käytettävissä hoitotuotteissa ei saa olla alkoholia. Alkoholin ja korkeataajuuspään kosketus voi johtaa kemialliseen reaktioon.
- Älä kosketa silmämunaa korkeataajuuspäällä.
- Pidä ainoastaan korkeataajuuspään käsiosasta kiinni.

Imulaite ja suihkupullo

Käyttöohjeet - imulaite

1. Yhdistä putken vastakkainen puoli imulaitteen pidikkeeseen. Aseta lasinen imuputki pidikkeeseen. Paketissa tulee mukana neljä erilaista lasista imuputkea.
2. Tarkista, että pidikkeen filteri on paikallaan pidikkeessä.
3. Paina "STATE" -valitaksesi imulaitteen.
4. Tarpeen mukaan säädä tehoa painamalla "ENERGY" -painiketta ja aikaa painamalla "TIMER" -painiketta.
5. Paina #START/PAUSE" aloittaaksesi.
6. Voit säätää imua peittämällä pidikkeessä olevan reiän sormellasi.
7. Hoidon jälkeen kytke laite pois päältä painamalla "START/PAUSE" -painiketta.

Huomioitavaa

- Normaalin hoidon ei tulisi kestää yli viittä minuuttia. Mikäli laite ylikuumenee, kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen kymmenen minuutin päästä.

Varoitukset

- Älä jätä hoitopäätä samaan kohtaan ihoa liian pitkäksi aikaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Vältä käyttämistä ärsyntyneellä iholla.
- Varmista, että suihkupullo on kytketty oikeaan reikään laitteessa. Mikäli suihkupullo on kytketty väärään reikään se saattaa vaurioittaa laitetta tavalla, joka ei kuulu valmistajan takuun piiriin.
- Älä käytä imulaitetta tai suihkupulloa pitkiä aikoja ilman taukoja, jotta laite ei ylikuumene. Tauottomuuden aiheuttaman ylikuumenemisen aiheuttamat vauriot eivät kuulu valmistajan takuun piiriin.

Käyttöohjeet - suihkupullo

1. Täytä pullo hoitoon sopivalla nesteellä. Paketissa on kaksi suihkupulloa. Molemmat sisältävät eri nestettä.
2. Kytke putki suihkupulloon.
3. Paina "STATE" -valitaksesi suihkupullo-toiminnon.
4. Tarpeen mukaan, säädä tehoa painamalla "ENERGY" -painiketta, ja aikaa painamalla "TIMER" -painiketta.
5. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi hoidon.
6. Voit säätää suihkuominaisuutta sormellasi peittämällä tai paljastamalla aukon pullon päällä.
7. Kun hoito on suoritettu paina #START/PAUSE" -painiketta sammuttaaksesi laitteen.

Huomioitavaa

- Suihkuta alaspäin otsasta hoidon aikana. Estä nesteen joutuminen nenään. Pyydö hoidettavaa sulkemaan silmänsä, sekä suunsa.
- Pidä sopiva välimatka hoidettavan kasvoihin suihkuttamisen aikana, jotta suihkutuksen tuntu ei ole kevyeltä sumulta hoidettavan iholla.
- Normaalin hoidon ei tulisi kestää yli viittä minuuttia. Mikäli laite ylikuumenee, kytke laite pois päältä ja käynnistä uudelleen kymmenen minuutin päästä.

PYÖRIVÄT HARJAOSAT

Ennen hoitoa

1. Puhdista iho kostealla liinalla.
2. Pehmennä ihon pinta höyryttämällä.
3. Lisää hoitoöljyä iholle.

Hoidon aloitus

1. Valitse asiakkaan iholle sopiva harjanpää. Herkälle ja kuivalle iholle sopii pehmeä harjanpää, kovemmat päät on tarkoitettu kovalle ja rasvaiselle iholle.
2. Säädä harjan pyörimissuunta painamalla "STATE" -painiketta. Valitse teho painamalla "ENERGY" -painiketta. Ajan voit säätää painamalla "TIMER" -painiketta.
3. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.

Varoitukset

- Älä paina hoitoaluetta harjalla liian kovaa sen ollessa päällä.
- Älä käytä hapokkaita tai emäksisiä aineita tämän tuotteen kanssa.
- Hoidon jälkeen käännä laite pois päältä ja irroita virtajohto.
- Mikäli hoidettava kärsii yliherkästä ihosta tai ihotulehduksesta tulisi hoitoa välttää.
- Mikäli hoitoalueella on vaurioituneita hiuesverisuonia, ei tätä toimintoa tule käyttää.

Kylmäkuuma vasarahoito

1. Paina "STATE" -painiketta valitaksesi kylmän ja kuuman välillä.
2. Säädä tehoa painamalla "ENERGY" -painikettaja hoitoaika painamalla "TIMER" -painiketta.
3. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi hoidon.

Huomioitavaa

- Ensimmäisellä käyttökerralla laite aloittaa hoidon 5 minuuttia laitteen käynnistyksen jälkeen.
- Ensimmäisen hoidon jälkeen hoidon aloitusaika laskee kolmeen minuuttiin.
- Paras toiminta lämpötila on noin 25C.
- Älä tuki laitteen tuuletuskanavaa hoidon aikana. Mikäli tuuletuskanava tukkeutuu voi laitteeseen aiheutua oikosulku.
- "START/PAUSE" -painikkeen painamisen jälkeen tarkista onko vasara kytketty päälle. Vasaran kytkeminen tapahtuu laittamalla vasaran kytkimen "o" asentoon. Päältä pois laittaessa tulee vasaran kytkimen olla "-" asennossa.

UKK

Imulaite ja suihkupullo

Jos imuteho on vähentynyt:

- Vaihda metalli - ja vaahtofilterit.

KUNNOSSAPITO

Korkeataajuuspää

- Lasiputket tulee pitää puhtaina ja kuivina, ja ne tulee desinfioida ennen ja jälkeen jokaisen hoitokerran.

Imulaite ja suihkupullo

- Käsipidikkeen vaahtofilteri tulee vaihtaa viiden hoitokerran jälkeen. Pura käsiosa ja vaihda filteri. Tämän jälkeen kokoa käsiosa.

Pyörivät harjaosat

- Hoidon jälkeen upota harjaosa veteen, jossa on hieman pesuainetta. Anna harjan olla vedessä viiden minuutin ajan. Pesun jälkeen upota harjaosa alkoholiin puoleksi tunniksi.
- Harjaosa täytyy desinfioida käyttäen ultraviolettisäteilyä ja tämän jälkeen asettaa alkuperäiseen pakkaukseen.