



MultiEquipment. Ref F-332

Instruction manual

4 IN 1

Diamond microdermabrasion
Ultrasound
Cold & Hot Hammer
Skin Scrubber

Varoitus

- Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen tarkastus on pakollinen, pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, saunatila jne.) välttääksesi vahingon syntymisen laitteen sähkökomponenteille.
- Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille sääolosuhteille voi aiheuttaa vahikoa laitteelle.
- Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, pyydämme ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.

EU - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:
1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

Kierrätys

Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi normaalina sekajätteenä Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa säästämään luonnonvaroja ja parantaa luonnonsuojelun standardeja, koskien sähköjätteen käsittelyä.

Tervetuloa!

Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta. Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää ammattilaiselta opastusta laitteen oikeaoppisessa käytössä. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen vääräoppisesta käytöstä.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. Jos löydätte virheitä näistä ohjeista, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, jotta voimme korjata ne.




weelko
the wellness
company

MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading
Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE


MYyjÄ
Verkkokauppa Esthetique
Hoitolas i - 24/7 -
Email myynti@hoitolas.fi
GSM +358451792031FI
www.hoitolas.fi

Etupaneeli

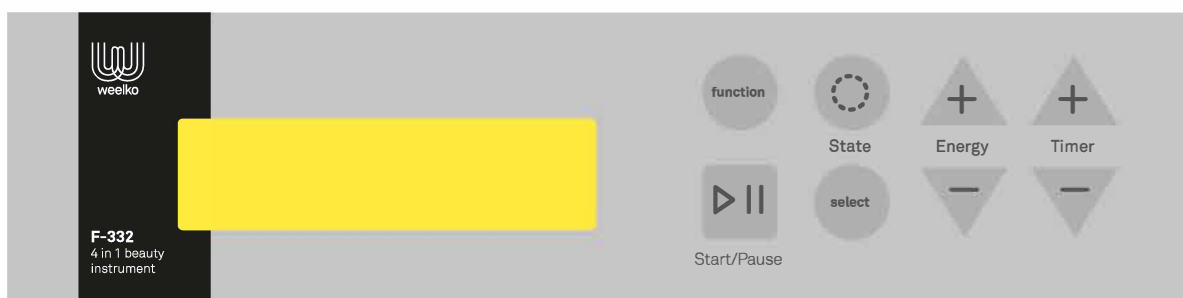

Käyttöohjeet

1. Kytke virtajohto laitteen takaosaan.
2. Kytke laitteen varusteet kuvan näyttämällä tavalla.

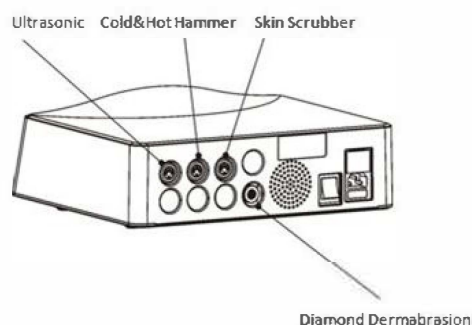

3. Paina "POWER" -painiketta kytkeäksesi laitteeseen sähkö.
4. Paina "FUNCTION" -painiketta valitaksesi halutun toiminnon. Toiminnot ovat seuraavassa järjestyksessä: Ihokuorinta, ultraääni, timanttikuorinta, kylmäkuumavasara

Huomioitavaa

Laite lopettaa virran syötön hoitopäihin automaattisesti, mikäli se ei havaitse hoidettavan ihoa. Laite aloittaa virran syötön automaattisesti heti, kun hoitopää koskettaa jälleen hoidettavan ihoa. Näin ollen, jos laite lopettaa toiminnan tällaisessa tilanteessa, kyseessä ei ole vika. Toiminnolla varmistetaan laitteen turvallista käyttöä.

IHOKUORINTA

1. Aseta ranneke hoidettavan ranteeseen.
2. Levitä välittäjägeeliä runsaasti hoitoalueen pinnalle.
3. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "STATE" -painiketta. Haluttu teho painamalla "ENERGY" -painiketta. Haluttu hoitoaika painamalla "TIMER" -painiketta. Asetuksia voi vaihtaa myös hoidon aikana.
4. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi. Kun laite havaitse virran laitteen ja hoidettavan välillä se aloittaa hoidon. Laite toimii normaalisti, kun ihokuorinta -merkki näkyy ruudulla. Jos laitteen ja hoidettavan välinen virta katkeaa lopettaa laite toiminnan ja ihokuorinta -merkki katoaa näytöltä.

Varoitukset

- Seuraavista sairauksista kärsiviä kehoitetaan olemaan käyttämättä hoitolaitetta: sydänsairaudet ja taruntataudit. Mikäli kehoosi on asetettu metallia lääketieteellisen hoidon tähden tai omaat erittäin hennon ruumiin rakenteen, niin kehotamme pidättäytymään hoidosta.
- Välttääksesi palovammat, älä pidä hoitopäätä samassa asennossa iholla liian kauaa.
- Lisää hoitoon tarkoitettua nestettä, mikäli sitä on liian vähän.
- Kun hoitopää irrotetaan laitteesta, pyydämme tekemään sen oikealla tavalla. Älä irrota hoitopäitä voimalla laitteesta.
- Virtajohdon ollessa kiinni laitteessa irrota se johdon päästä kiinniottaen. Älä vedä johdosta.
- Älä käsittele hoitopäitä huolimattomasti, jotta niihin ei tule fyysistä vahinkoa. Vahingoittunut hoitopää voi vahingoittaa hoidettavan ihoa.

ULTRAÄÄNI

Ennen hoitoa

1. Puhdista hoitoalue käyttäen ihollesi tarkoitettuja hoitotuotteita.
2. Poista ylijäänyt hoitoaine höyryttämällä hoitoaluetta 10 minuutin ajan.
3. Puhdista hoitoalue uudelleen poistaaksesi loput epäpuhtaudet, jotta ultraäänilaitte ei työnnä likaa takaisin ihosi sisään.
4. Sävytä koko hoitoalue sopivalla kasvovedellä.
5. Kasvoveden pyyhittyäsi tulee ihosi olemaan täydellisen puhdas ja optimaalisesti suojattu hoitoa varten.
6. Levitä välittäjägeeliä hoitoalueelle.

Hoidon aloitus

1. Valitse haluamasi: hoitopää painamalla "SELECT" -painiketta, aaltotyyppi painamalla "STATE" -painiketta, teho painamalla "ENERGY" -painiketta ja haluamasi hoitoaika painamalla "TIMER" -painiketta. Asetuksia voi muuttaa myös hoidon aikana.
2. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.

Huomioitavaa

- Välittäjägeelin tulisi antaa vaikuttaa hoitoalueella vähintään 15 minuuttia ennen hoidon aloitusta.
- Alemmat tehot on tarkoitettu kasvojen alueen hoitoihin, ja korkeammat vartalohoitoihin.
- Mikäli hoitoalue on herkkä tai kooltaan pieni, kehotamme käyttämään silmille tarkoitettua hoitopäätä, sekä varmistamaan, että teho on asetettu 5-7 pykälän kohdalle ("ENERGY" -kohta LDC-näytössä). Hoitoajan voi vähentää 8-10 minuuttiin.
- Standardi hoitokuuri kestää noin 10 hoitokertaa. Jokaisen hoitopäivän välissä tulisi pitää vähintään yksi välipäivä. Mikäli kasvohoitoja suoritetaan samaan aikaan, tulisi pitää 7 välipäivää hoitojen välissä.

Varoitukset


- Ei suositella käytettäväksi kuivalle iholle.
- Ei suositella käytettäväksi raskaana olevan naisen vatsan seudulle.
- Ei suositella henkilöille, joilla on sydämentahdistin (tällä tarkoitetaan kaikkia laitteita, jotka millään tapaa säätelevät sydämen toimintaa)
- Ei suositella henkilöille, joilla on sydänsairaus, tai sydämen vajaatoimintaa.
- Varmista aina laitteen käytön yhteydessä, että alueella, johon hoito kohdistuu on tarpeeksi kosteusoidetta tai seerumia.
- Ultraäänihoito sopii kaikille ihotyypeille. Hoitoaika ja laitteen asetukset voidaan säätää sopimaan jokaiselle ihotypille. Jos omaat herkän ihon suosittelemme vähentämään hoitoajan 3-5 minuuttiin ja varmistamaan, että teho-asetukset ovat alimmilla tasoilla hoidon alkaessa.

TIMANTTIKUORINTA

1. Kytke putki hoitolaitteen takapaneeliin, kuten piirroksesta käy ilmi.
2. Kytke putken toinen pää käsiosaan. Kytke käsiosaan sopiva timanttipää.

Ø 22 MM	
D100	Vartalo. Akne, polvet, kynärpäät ja raskausarvet
D180	
Ø 19 MM	
D180	Kasvot. Pigmenttihäiriöt, ihohuokoset, ikääntyminen, auringon polttamat
D220	
Ø 15 MM	
D100	Arvet, silmäpussit ja muut pienet esteettiset ongelmat
D200	
D250	
Ø 8 Y 6 MM	
D200	Silmät, nenä, rypyt, akne, näppylät, mustapäät
D250	

3. Varmista, että vaahto- ja metallifilterit ovat paikoillaan käsiosan sisällä.

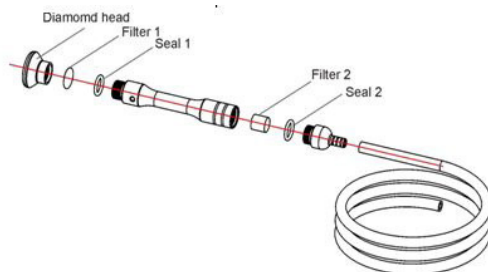

5. Voit hallita imuefektiä peittämällä käsiosassa olevan reiän.
6. Valitse haluttu hoitoaika ja teho. Näitä voi muuttaa kesken hoidon.
7. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.

Varoitukset

- Älä jätä hoitopäätä samaan kohtaa ihoa liian pitkäksi aikaa palovammoilta välttyäksesi.
- Vältä käyttöä ärsyntyneellä iholla.
- Hoitoa ei saa suorittaa seuraaviin: ihokasvaimet, luomet, syntymäjärljet, suonikohjut, huulet, silmät, herpes ja syylät.

Kylmäkuumavasara

1. Paina "STATE" -painiketta aloittaaksesi.
2. According to the needs, adjust the output temperature by pressing "ENERGY" and desired time of operation by pressing "TIMER".
3. Press "START/PAUSE" to start working.

Huomioitavaa

- Ensimmäisellä käyttökerralla laite on toimintakunnossa 5 minuuttia käynnistytyn jälkeen.
- Seuraavilla käyttökerroilla vastaava aika on noin 3 minuuttia.
- Ihanteellinen käyttölämpötila on 25c.
- Älä tuki laitteet tuuletusaukkoa. Tukkuminen voi aiheuttaa toimintahäiriötä.
- "START/PAUSE" -painikkeen painamisen jälkeen tarkista onko vasara kytketty päälle. Vasaran kytkeminen tapahtuu laittamalla vasaran kytkimen "o" asentoon. Päältä pois laitettaessa tulee vasaran kytkimen olla "-" asennossa.

Varoitukset

- Kylmäkuumavasara ei ole tehty kestävästä materiaalista, joten pyydämme käsittelemään sitä varoen.
- Mikäli vasarassa on halkeamia, pyydämme vaihtamaan sen.
- Ole varovainen johdon kanssa. Älä kisko sitä liikaa.

UKK

Ihokuorinta

Mikäli hoitopää lopettaa toiminnan:

- Jos hoitopää on irti ihosta, se lopettaa toimintansa 5 sekunniksi. Tämä on turvallisuutta edistävä toiminto ja sitä ei tule sekoittaa toimintahäiriöön.
- Kosketa ihoa hoitopäällä uudelleen, niin se aloittaa toimintansa 5 sekunnin kuluttua.

Ultraääni

Kokeile seuraavaa, mikäli hoitopää ei tunnu toimivan.

- Laita hoitopäähän tippa vettä.
- Kytke laite päälle ja lisää tehoa hitaasti.
- Jos vesi alkaa liikkua ja haihtua, toimii laite kunnolla.

Laite ja hoitopäät toimivat, mutta hoidettava ei tunne mitään.

- Varmista, että hoitoalueella on tarpeeksi välittäjägeeliä.

Timanttikuorinta

Mikäli imuteho vähentyy:

- Vaihda vaahto ja metalli -filtterit.

KUNNOSSAPITO

Ihon kuorinta

- Jos hoitopäässä on öljyä, poista se välittömästi.
- Puhdista hoitopää aina käytön jälkeen. Säilytä sitä aina suojakankaassa.
- Varastoi hoitopää varoen, jotta se ei vaurioidu.

Ultraääni

- Hoitopäät tulee puhdistaa aina käytön jälkeen käyttäen puhdasta, kädenlämpöistä vettä ja pehmeää riepua. Puhdistuksen jälkeen hoitopäät tulee desinfioida sopivalla desinfiointiaineella. Hoitopäät tulee säilyttää niille tarkoitetuissa telineissä. Puhdista hoitopäät aina ennen hoitoa.
- Älä ikinä upota hoitopäätä mihinkään nesteeseen!

Timanttikuorinta

- Vaahto- ja metallifiltteri täytyy vaihtaa 5 hoitokerran jälkeen. Pura käsiosa ja aseta filtrit paikoilleen. Kokoa käsiosa takaisin käyttökuntoon.
- Puhdista desinfioi timanttipäät jokaisen hoitokerran jälkeen.