

Sisällysluettelo	
Radiotaajuus ja sessiot	2
Hoitolaite, käyttö ja mallit	3
Kasvo ja vartalo applikaattorit, sekä tekniset tiedot	4
Yhteystiedot	5


Radiofrequency with **MultiEquipment** by Weelko

Löysä iho? **Ikääntyminen?** Ryppyjä? **Pigmenttihäiriöitä?** Nestehukka? **Roikkuva iho?** Pussimainen iho? **Epätasainen iho?** Selluliittä?

Näihin kaikkiin auttaa: **MultiEquipment**, F-333

Radiotaajuus laite kasvojen esteettisiin hoitoihin. Ideaalinen ihon kiinteyttämiseen ja muovaamiseen. Hoitolaite vartaloon levittämä lämpö stimuloi kollageenisäikeitä ja korjaa ryppyjä. Varustettu kahdella käsiosalla ja seitsemällä hoitopäällä.

Tarkista tiedot laitteesta tästä dokumentista.

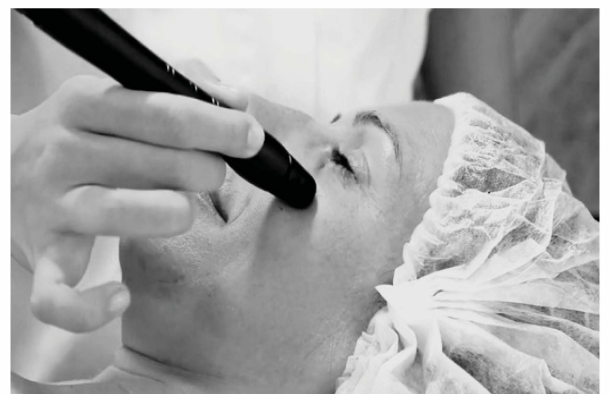

Radiotaajuus

Tietoa radiotaajuudesta

Hoitotapa, jota käytetään usein ihon kiristykseen. Tätä hoitolaitetta suositellaan käytettäväksi pääasiassa kasvohoitoihin ja tiettyyn vartalon osaan kohdistettavaan hoitoon.

Hoitolaite käyttää yksinapaista toimintaa ihon nuorentamiseen. Se perustuu yhden elektrodin sijoittamiseen hoitoalueelle ja toisen sijoittamiseen kauas ensimmäiset elektrodista, jotta virta kulkee koko kehon läpi. Tuloksena kudokset hoitoalueella lämpenee syvältä ja intensiivisesti.

Mistä se koostuu?

Radiotaajuus toimittaa lämpöenergiaa hoitoalueelle vaikuttaen ihokudokseen parantaen ihon elastisuutta ja verenkiertoa. Kun syvemmät ihon osat lämpenevät, keho reagoi muutokseen tuottamalla lisää kollageeneja, sillä keho tulkitsee hoidon valheellisesti vammaksi. Kehon aloittaa myös ihohuokosten tiheytyksen kollageenien erittämisen lisäksi. Molemmat ovat kehon reaktioita vammalta suojautumiseen, jonka hoito laukaisee. Ihohuokosten tiheytyminen ja kollageenien eritystä tuottavat halutun hoitotuloksen.

Hoidon tulos?

- Stimuloi verenkiertoa
- Stimuloi kehon kollageenien tuottoa ja lisää ihon elastisuutta
- Parantaa ihon elastisuutta

Mitä varten hoito on?

- Parantaa ihon laatua
- Vähentää ihon velttoutta
- Muotoilee leukaa
- Pehmentää silmien, otsan ja poskien alueita
- Vähentää kaksoisleukaa
- Vähentää hoitoalueen turvotusta

Kenen kohdalla hoitoa tulee välttää?

- Iholeikatut
- Raskaana olevat tai imettävät naiset
- Vakavista sydänsairauksista kärsivät
- Veren hyytymisestä kärsivät
- Lihassairauksista kärsivät
- Syöpää sairastavat
- Sydämentahdistimia käyttävät
- Ihon sisäisiä metallipaloja hoitoalueella omaavat
- Vastikään asetetun kollageeni-implantin omaavat

Sessiot

Standardin radiotaajuus hoidon pituus on 4-10 sessiota. Kasvohoidon kesto on noin 10 minuuttia ja vartalohoidon noin 30 minuuttia. Välipäiviä tulisi olla 15 kahden hoidon välissä.

Radiotaajuushoidon sivuvaikutuksia voivat olla:

- Punoitus ja turvotus hoidon jälkeen (väliaikainen, mutta yleinen sivuvaikutus).
- Ihonalaista verenvuotoa (harvinainen).



Hoitolaite, F-333:**Lyhyet käyttöohjeet:**

- Lue käyttöohjeet tarkkaan ja kytke laite oikein käyttövalmiuteen.
- Levitä välittäjägeeliä hoitoalueelle.
- Kytke hoitolaite päälle painamalla "POWER" -painiketta.
- Paina "SELECT" -painiketta valitaksesi halutun käsiosan (kasvot tai vartalo).
- Aseta virran paluuseen tarkoitettu metallilaatta isoon kehon osaan. Kyseisen metallilaatan tulee olla lähellä hoitoaluetta, hoitoalueen sijainnista riippumatta.
- Valitse oikean kokoinen elektrodi hoitoalueen koon mukaan.
- Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi hoidon.
- Valitse aaltotyyppi hoidettavan tarpeen mukaan. Ensimmäisillä hoitokertoilla on suositeltavaa käyttää tauotettua aaltotyyppiä (merkattu herkälle iholle). Myöhemmin aaltotyyppiä voidaan vaihtaa ammattilaisen mielipiteen ja hoidettavan mukavuuden mukaan.
- Aseta elektrodit iholle samalla tehden kehämäisiä liikkeitä. Älä jätä elektrodeja paikalleen (palovammariski).
- Lopettaaksesi paina "START/PAUSE" -painiketta.

Pylväs -malli:

Hoitolaite on pöydällä pidettävä väline. Lisäosana on kuitenkin mahdollista ostaa Weelkon **MULTILAB** -kärry tai **K-PSULE** -pylväs.



Kasvohoitoon:

Käsiosa kasvoille



Hoitopäät kasvohoidoille.

Ennen hoitoa:

Käsiosa vartalolle



Hoitopäät vartalohoidoille

**Tekniset tiedot:**

Ulottuvuudet ja paino :	Pakkauskoko (cm)	49 x 45 x 19,5 cm
	Tuotteen koko (cm) W x H x D	33,5 x 9,5 x 25,5
	Bruttopaino (kg)	5
	Nettopaino (kg)	4,5
Tekniset tiedot:	Voltit	220V—240V
	Taajuus	50 Hz/60Hz
Maksimi toimintavirta Toimintataajuus		150 Wattia
		0,3 MHz (300kHz)

Osat:

Nro.	Tuote	REFERENSSI
1	7 hoitopäätä	40024
2	Käsiosa kasvoille	40019
3	Käsiosa vartalolle	40020



Vieraile TECHNICAL INFO -kohdassa internetsivuillamme ja lataa kaikki tekniset jms. tiedot. Kuvat, esitteet, tekniset tiedot jne.

Dossiers | Technical Zoom



Katso WEELKO TV osoitteessa weelko.com. Se on paras tapa oppia käyttämään tuotteitamme! Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!



weelko.com

MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE

MYyjÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi – 24/7 –
Email myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi

