



MultiEquipment . Ref F-333

Käyttöohjeet

Radiotaajuus

Varoitus

- Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen tarkastus on pakollinen, pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, saunatila jne.) välttääksesi vahingon syntymisen laitteen sähkökomponenteille.
- Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille sääolosuhteille voi aiheuttaa vahikoa laitteelle.
- Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, pyydämme ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.

Kierrätys



Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi normaalina sekajätteenä Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa säästämään luonnonvaroja ja parantaa luonnonsuojelun standardeja, koskien sähköjätteen käsittelyä.

EU - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:

1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

Tervetuloa!

Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta. Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää ammattilaiselta opastusta laitteen oikeaoppisessa käytössä. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen vääräoppisesta käytöstä.


Yritys pidättää oikeuden muuttaa laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. Jos löydätte virheitä näistä ohjeista, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, jotta voimme korjata ne.



weelko
the wellnes
company


MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE
MYYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi GSM
+358451792031 FI www.hoitolasi.fi

Etupaneeli

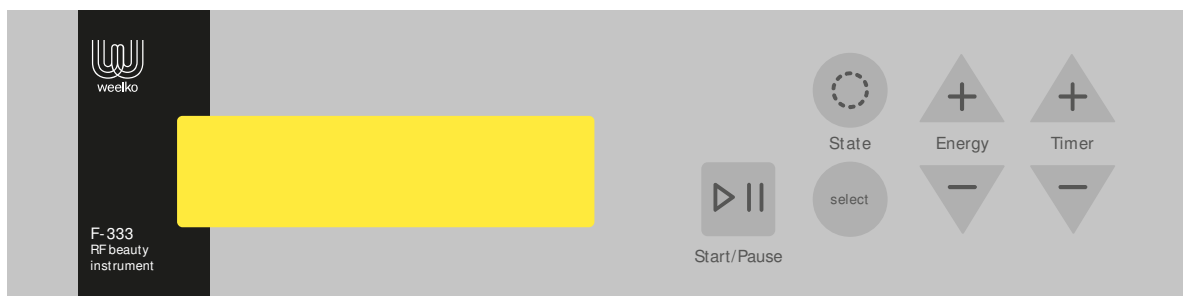

Käyttöohjeet

1. Kytke virtajohto laitteen takaosaan.
2. Kytke laitteen varusteet kuvan näyttämällä tavalla.

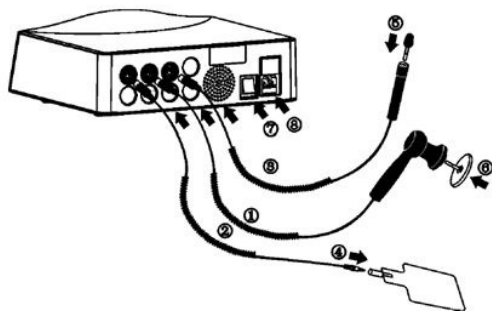

6. Valitse haluttu elektrodi. Valitse elektrodi hoitoalueen koon mukaan.
7. Levitä geeliä tai rasvaa hoitoalueelle.
8. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi hoidon.
9. Valitse aaltotyyppi hoidettavan toiveen mukaan. Ensimmäisellä hoitokerralla (tai jos hoidettavalla on herkkä iho) on suositeltavaa käyttää pulssimaista aaltotyyppiä. Totuttelun jälkeen voidaan aaltotyyppi valita asiakkaan toiveen mukaan.
10. Aseta elektrodit hoidettavan iholle kehämäisin liikkein. Älä pidä elektrodeja samalla alueella liian kauan, jotta hoidettavan ihoon ei synny palovammoja.
11. Kun hoito on suoritettu paina "START/PAUSE" -painiketta.

Tarvikkeiden kytkennät

Numero	Varuste
1	Vartaloelektrodijohto
2	Negatiivilaatan johto
3	Kasvoelektrodijohto
4	Negatiivilaatta
5	Kasvoelektrodit
6	Vartaloelektrodit
7	"POWER" -painike
8	Virtajohto

3. Paina "POWER" -painiketta.
4. Paina "SELECT" -painiketta valitaksesi halutun elektrodikäsiosan (kasvot tai vartalo). Näytöstä näet kumpi käsiosa on toiminnassa.
5. Aseta negatiivilaatta isolle ihoalueelle. Alueen tulee olla lähellä hoidettavaa aluetta.

HUOM: välttääksesi vauriot hoidettavalle, on negatiivilaattaa käytettävä AINA.

Huomioitavaa

- Radiotaajuus hoitoja ei saa jatkaa liian pitkään. Suositeltu kesto kasvohoidoille on 10 minuuttia ja 20 minuuttia vartalohoidoille. Kokonaishoitoaika on aina yli 60 minuuttia.
- Jotta palovammoilta vältytään muista pitää negatiivilaatta aina kontaktissa ihon kanssa.
- Kun asetat elektrodit iholle tee kehämäisiä liikkeitä, ilman liikkeen pysäyttämistä.
- Älä unohda lisätä geeliä tai rasvaa hoitoalueelle.

Tekniset tiedot

Tietoa toiminnasta	
Tyyppi	Yksinapainen
Toimintateho (maksimi)	150 Wattia
Toimintataajuus	0,3 MHz (300 kHz)

Sivuvaikutuksista

Radiotaajuushoidon sivuvaikutuksia voivat olla:

- Hoitoalueen tilapäinen punoitus ja turvotus (yleistä)
- Pienet mustelmat (harvinaista).

Älä käytä radiotaajuushoitoa mikäli:

- Olet raskaana tai imetät
- Omaat metallisia proteeseja tai sydämentahdistimen
- Kärsit vakavista sydänongelmista
- Kärsit verenhyytymistä usein
- Kärsit tarttuvista kudossairauksista
- Sairastat syöpää
- Olet ylipainoinen
- Sinulle on vastikään asetettu kollageeni-implantteja