



MultiEquipment. Ref F-334

Käyttöohjeet

2 IN 1

Timanttikuorinta
lhokuorinta

Varoitus

- Älä yritä avata, tai tarkistaa laitteen tarvikkeita tai sen sisäisiä osia. Jos laitteen tarkastus on pakollinen, pyydämme ottamaan yhteyden jakelijaan tai asianmukaisen koulutuksen saaneeseen korjaajaan.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteissa tiloissa tai huonosti tuuletetuissa tiloissa (kylpyhuone, saunatila jne.) välttääksesi vahingon syntymisen laitteen sähkökomponenteille.
- Älä käytä laitetta ulkona, sillä altistuminen tietyille sääolosuhteille voi aiheuttaa vahikoa laitteelle.
- Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, pyydämme ottamaan yhteyden asianmukaisen koulutuksen saaneeseen ammattilaiseen tai jakelijaan.

EU - Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on läpäissyt seuraavat direktiivit:

1. Vaatimukset läpäisty pienjännitedirektiivistä: 2006/95/EY
2. Vaatimukset läpäisty sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta: 2004/108/EY

Recycling



Tuotteita, jotka on merkitty tällä merkillä, ei ole tarkoitettu kierrätettäväksi normaalina sekajätteenä Euroopan maissa. Varmistaaksesi jätteen oikeanlaisen käsittelyn, kierrätä se paikallisten lakien vaatimin tavoin. Tämä pykälä auttaa säästämään luonnonvaroja ja parantaa luonnonsuojelun standardeja, koskien sähköjätteen käsittelyä.

Tervetuloa!

Kiitos paljon tuotteemme valitsemisesta. Pyydämme lukemaan käyttöohjeet tarkkaan ennen laitteen käyttöä. Voit myös pyytää ammattilaiselta opastusta laitteen oikeaoppisessa käytössä. Emme ota mitään vastuuta tapaturmista, jotka johtuvat laitteen vääräoppisesta käytöstä.

Yritys pidättää oikeuden muuttaa laitteiden yksityiskohtia ilman eri huomautusta. Jos löydätte virheitä näistä ohjeista, pyydämme ottamaan yhteyttä sähköpostilla, jotta voimme korjata ne.




weelko
the wellness
company

MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE


MYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi

Etupaneeli

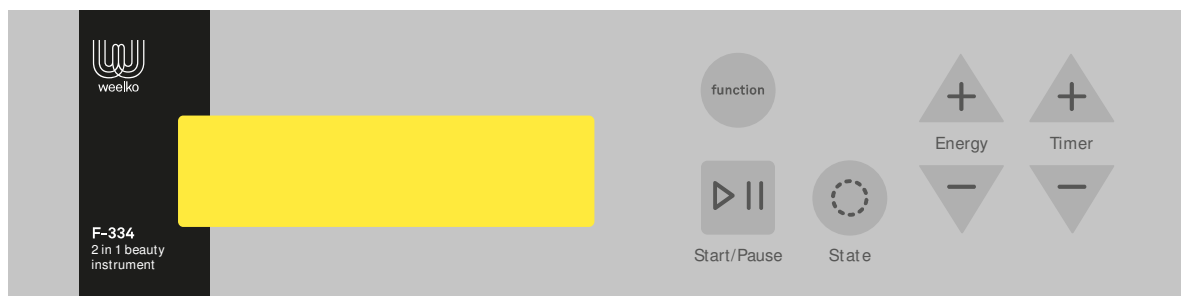

Käyttöohjeet

1. Kytke virtajohto laitteen takaosaan.
2. Kytke laitteen varusteet kuvan näyttämällä tavalla.

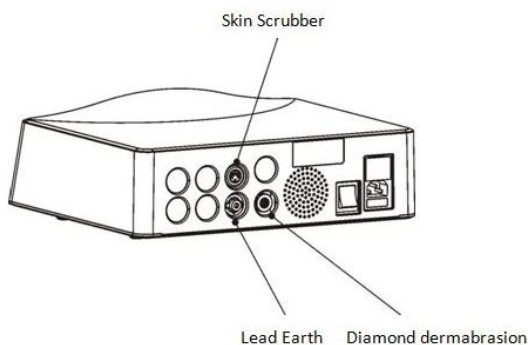

3. Paina "POWER" -painiketta kytkeäksesi laitteeseen sähkö.
4. Paina "FUNCTION" -painiketta valitaksesi halutun toiminnon. Toiminnot ovat seuraavassa järjestyksessä: ihonkuorinta, timanttikuorinta

Huomioitavaa

Laite lopettaa virran syötön hoitopäihin automaattisesti, mikäli se ei havaitse hoidettavan ihoa. Laite aloittaa virran syötön automaattisesti heti, kun hoitopää koskettaa jälleen hoidettavan ihoa. Näin ollen, jos laite lopettaa toiminnan tällaisessa tilanteessa, kyseessä ei ole vika. Toiminnolla varmistetaan laitteen turvallista käyttöä.

Ihokuorinta

1. Aseta ranneke hoidettavan ranteeseen.
2. Levitä välittäjägeeliä runsaasti hoitoalueen pinnalle.
3. Valitse haluttu aaltotyyppi painamalla "STATE" -painiketta. Haluttu teho painamalla "ENERGY" -painiketta. Haluttu hoitoaika painamalla "TIMER" -painiketta. Asetuksia voi vaihtaa myös hoidon aikana.
4. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi. Kun laite havaitse virran laitteen ja hoidettavan välillä se aloittaa hoidon. Laite toimii normaalisti, kun ihokuorinta -merkki näkyy ruudulla. Jos laitteen ja hoidettavan välinen virta katkeaa lopettaa laite toiminnan ja ihokuorinta -merkki katoaa näytöltä.

Varoitukset

- Seuraavista sairauksista kärsiviä kehoitetaan olemaan käyttämättä hoitolaitetta: sydänsairaudet ja taruntataudit. Mikäli kehoosi on asetettu metallia lääketieteellisen hoidon tähden tai omaat erittäin hennon ruumiin rakenteen, niin kehoitamme pidättäytymään hoidosta.
- Vältäksesi palovammat, älä pidä hoitopäätä samassa asennossa iholla liian kauaa.
- Lisää hoitoon tarkoitettua nestettä, mikäli sitä on liian vähän.
- Kun hoitopää irrotetaan laitteesta, pyydämme tekemään sen oikealla tavalla. Älä irrota hoitopäitä voimalla laitteesta.
- Virtajohdon ollessa kiinni laitteesta irrota se johdon päästä kiinniottaen. Älä vedä johdosta.
- Älä käsittele hoitopäitä huolimattomasti, jotta niihin ei tule fyysisistä vahinkoa. Vahingoittunut hoitopää voi vahingoittaa hoidettavan ihoa.

TIMANTTIKUORINTA

1. Kytke putki hoitolaitteen takapaneeliin, kuten piirroksesta käy ilmi.
2. Kytke putken toinen pää käsiosaan. Kytke käsiosaan sopiva timanttipää.

Ø 22 MM

D100	Vartalo. Akne, polvet, kynärpäät ja raskausarvet
D180	

Ø 19 MM

D180	Kasvot. Pigmenttihäiriöt, ihohuokokset, ikääntyminen, auringon polttamat
D220	

Ø 15 MM

D100	Arvet, silmäpussit ja muut pienet esteettiset ongelmat
D200	

D250


Ø 8 Y 6 MM

D200	Silmät, nenä, rypyt, akne, näppyvät, mustapäät
D250	

Varoitukset

- Älä jätä hoitopäätä samaan kohtaa ihoa liian pitkäksi aikaa palovammoilta välttyäksesi.
- Vältä käyttöä ärsyyntyneellä iholla.
- Hoitoa ei saa suorittaa seuraaviin: ihokasvaimet, luomet, syntymäjaljet, suonikohjut, huulet, silmät, herpes ja syylät.

3. Varmista, että vaahto- ja metallifilterit ovat paikoillaan käsiosan sisällä.

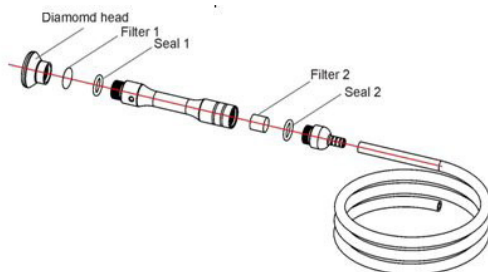

5. Voit hallita imuefektiä peittämällä käsiosassa olevan reiän.
6. Valitse haluttu hoitoaika ja teho. Näitä voi muuttaa kesken hoidon.
7. Paina "START/PAUSE" -painiketta aloittaaksesi.

UKK

Ihokuorinta

Mikäli hoitopää lopettaa toiminnan:

- Jos hoitopää on irti ihosta, se lopettaa toimintansa 5 sekunniksi. Tämä on turvallisuutta edistävä toiminto ja sitä ei tule sekoittaa toimintahäiriöön.
-
- Kosketa ihoa hoitopäällä uudelleen, niin se aloittaa toimintansa 5 sekunnin kuluttua.

Timanttikuorinta

Mikäli imuteho vähentyy:

- Vaihda vaahto- ja metallifiltrit.

KUNNOSSAPITO

Ihokuorinta

- Jos hoitopäessä on öljyä, poista se välittömästi.
- Puhdista hoitopää aina käytön jälkeen. Säilytä sitä aina suojakankaassa.
- Varastoi hoitopää varoen, jotta se ei vaurioidu.

TIMANTTIKUORINTA

- Vaahto- ja metallifilteri täytyy vaihtaa 5 hoitokerran jälkeen. Pura käsiosa ja aseta filtrit paikoilleen. Kokoa käsiosa takaisin käyttökuntoon.
-
- Puhdista desinfioi timanttipäät jokaisen hoitokerran jälkeen.