

Tietoisku

Wellness & Spa

November 2015

QG í JR ý

Kuvaus

2

Toiminnot ja säätö

3

Vaihtoehdot

5

Tekniset tiedot

7

Video- ja nettisivuinfo


8

Eroon kireyden tunteesta TENSOR:in avulla

Stressiä? **Huolia?** Väsymystä? **Huono verenkierto?**
Lihaskipua? **Turvotusta?**

Tutustu hoitopöytään, joka tarjoaa sekä
SPA:n rentouttavia ominaisuuksia että
mahdollisuuksia kivun hoitoon.

Tutustu
Tensor-SPA-hoitopöydän
yksityiskohtiin.

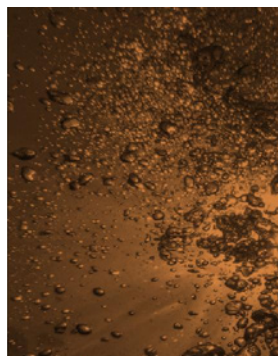

Kuvaus

Tensor-malli on suunniteltu pitkiä hoitoja varten ja sopii täydellisesti kauneushoitoloihin. Ulkonäöltään elegantti ja minimalistinen hoitopöytä tarjoaa asiakkaalle maksimaalisen mukavuuden yksiosaisen pehmeän 13 cm paksun patjan avulla. Pehmusteet ja mukavan tuntuinen päällyste auttavat rentoutumaan.

Tämä 3-osainen pöytä on varustettu neljällä moottorilla, jotka säätävät korkeutta ja selkänojan, jalkanojien ja koko pöydän kaltevuutta, mikä mahdollistaa Trendelenburg- ja anti-Trendelenburg asennot.



Tyylliltään elegantit pilarit (alumiiniset tai ruskeaksi lakatut) varmistavat pöydän maksimaalisen vakauden.

Pöydän runko on päällystetty samalla materiaalilla kuin patja, mikä saa pöydän näyttämään huolitellulta kokonaisuudelta.



Toiminnot

Käsisäätimen (vakio) tai jalkasäätimen (vaihtoehtoinen) avulla melkein kaikki pöydän liikkeet ovat säädettävissä.



Korkeuden säätö (68-89 cm)
varmistaa pöydän käytön
esteettömyyden asiakkaan kannalta.




Jalka- ja selkänöjen säätö
mahdollistaa laajan valikoiman
hoitoja, joita toteutetaan asiakas
selinmakuulla.



Anti-Trendelenburg-asento
helpottaa pöydän päältä poistumisen,
kun kyse on liikuntarajoitteisista tai
iäkkäistä asiakkaista.




Trendelenburg-asentoa usein
käytetään lymfahoidoissa, jolloin
halutaan parantaa jalkojen
verenkiertoa ja turvotusta.

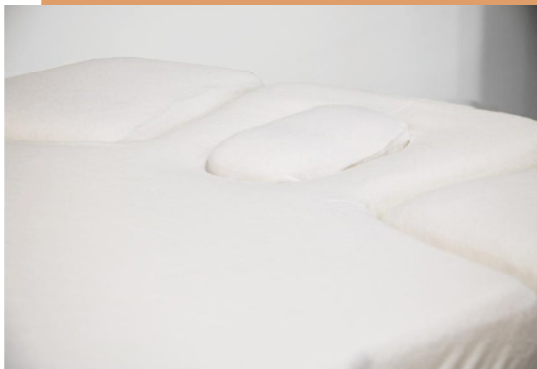


Niskanojassa on kasvo-aukko, joka tuo mukavuutta hoitoihin, joita tehdään asiakas vatsamakuulla.



Käsinoja voi säätää kaasujousella, ja ne ovat käteviä käyttää kasvohieronnan aikana.

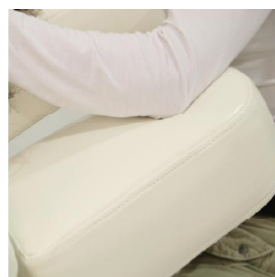

Asentojen säätö

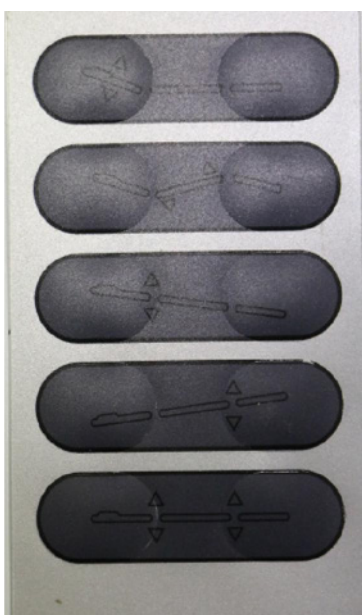

Painamalla ensimmäistä näppäintä voi säätää **selkänöjan** kallistusta.

Painamalla toista näppäintä voi säätää **jalkanojan** kallistusta.

Painamalla kolmatta näppäintä voi säätää koko pöydän kallistusta **Trendelenburg**-asennossa.

Painamalla neljättä näppäintä voi säätää koko pöydän kallistusta **Antitrendelenburg**-asennossa.

Painamalla viidettä näppäintä voi säätää pöydän **korkeutta**.

Vaihtoehdot

Ruskea runko

Vaihtoehto **Tensor BROWN BASE** on jo saatavilla: pöytä valkoisella päällysteellä ja ruskeaksi lakatulla rungolla.



PEITE

Suojaa pöytääsi Tensor-mallia varten suunnitellulla 4-osaisella peitteellä.



KUMIRENKAAT

Jotta pöytää olisi helppo liikuttaa, saatavilla ovat jarrulla varustetut pyörivät kumipyörät.



Täydennä työtilaasi

Valkoiset ja ruskeat puidet kärryt sopivat yhteen Tensorin kanssa ja täydentävät työtilaasi.

EASY+ (Tuotenro:1019)



ASSIST (Tuotenro: 1034)



HANDY (Tuotenro: 1032)





VANTAGE (Tuotenro: 1033)



Tekniset tiedot

Korkeus	68-89 cm
Leveys	76 cm
Koko pituus	185 cm
Alustan koko	121x54 cm
Tyynyn paksuus	13 cm
Selkänojan säätö	0°~+70°
Jalkanojan säätö	0°~-20°
Säädettävät käsinojat	Kyllä, korkeus (±10 cm)
Kasvo-aukko	Kyllä
Maksimipaino	200 kg
Verhoilu	Keinonahka
Moottoreita, kpl	4
Käsisäädin	Kyllä (vakio) vaihtoehtoinen
Pyörät	2249 / 2249 ruskea runko
Tuotenro	220 V /240 V
Jännite	50/60 Hz
Taajuus	0,12 kWh
Kulutus Nettopaino	104 kg
Bruttopaino	124 kg
Pakkauksen koko	204x81x72 cm
Kokoaminen	Toimitetaan koottuna

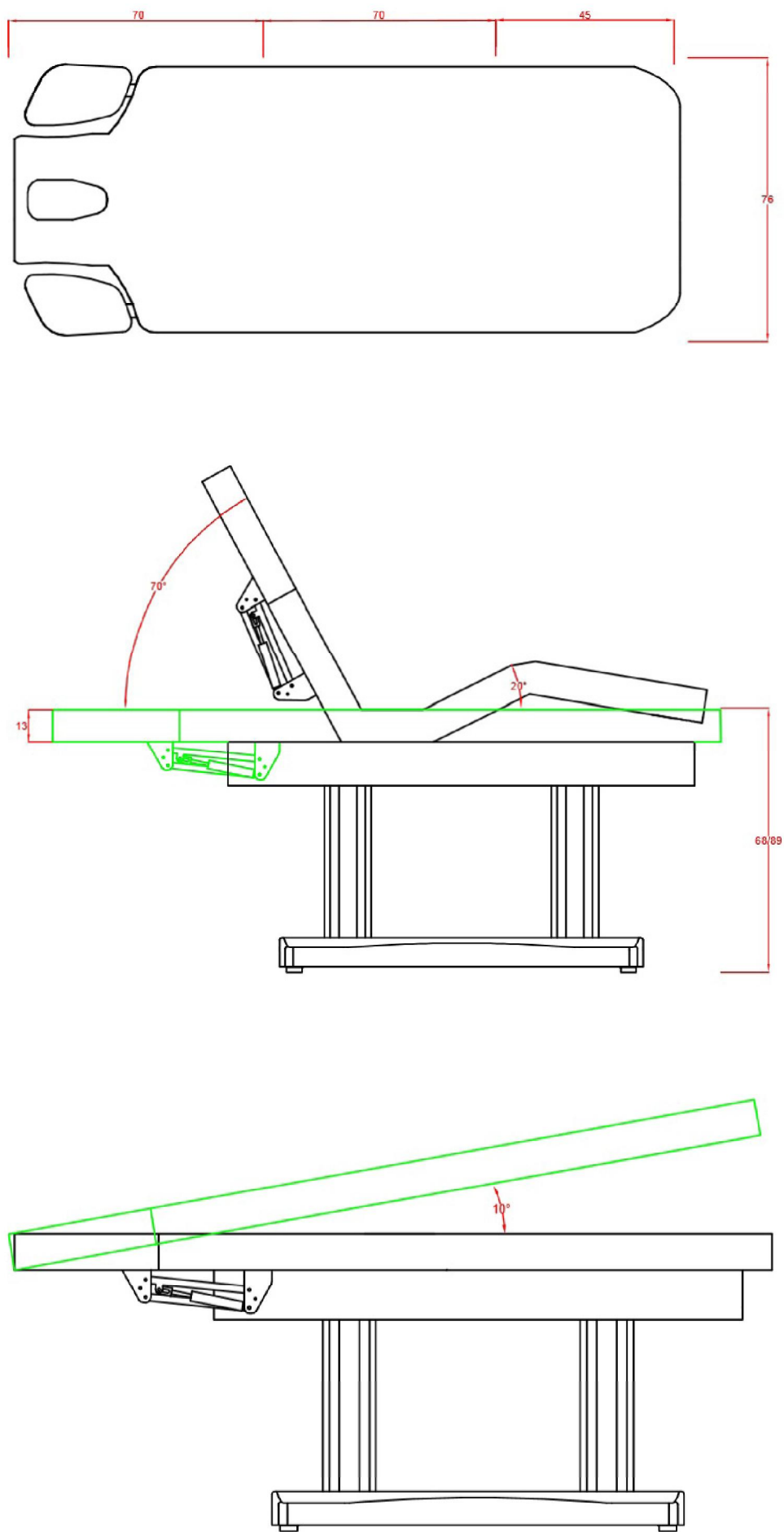

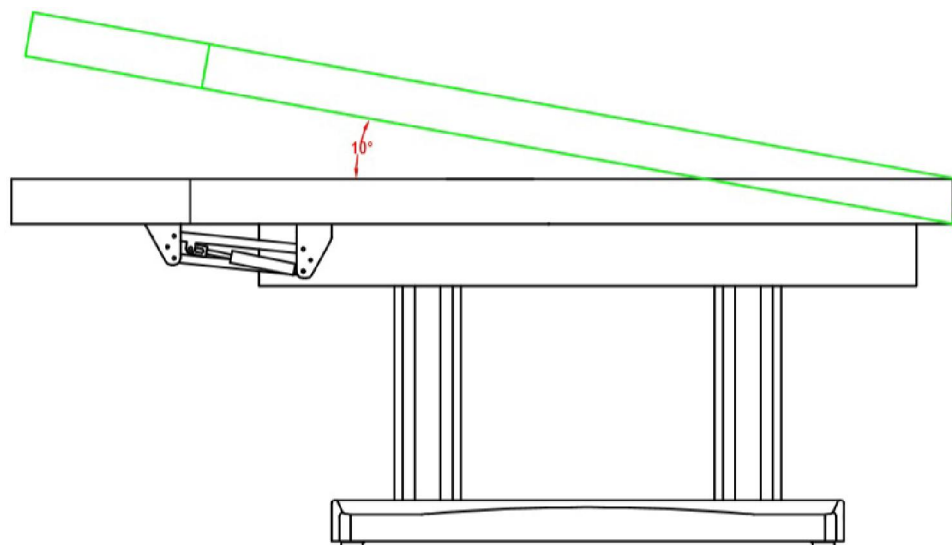


Video- ja nettisivuinfo

Jotta pääset tutustumaan kaikkiin hoitopöydän ominaisuuksiin ja näen kaikki yksityiskohdat kunnolla, käytössäsi on video, joka näyttää kaikki tuolin mahdollisuudet, joten esimerkiksi voit nähdä hoidon tuloksen laadun.

Meidän Vimeo- ja Youtube-kanavillamme voit katsoa videoita ja myös ladata niitä näyttääksesi asiakkaillesi tai ladataksesi omille myyntisivuillesi.*


Muista myös, että Weelko julkaisee jatkuvasti uusia tuotevideoita ja -tiedostoja!

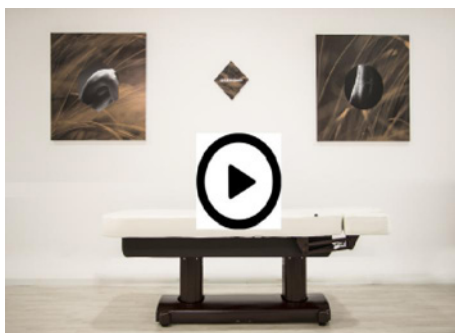

*Weelko Barcelona pidättää kaikki oikeudet.



Käy TECHNICAL INFO-sivuilla ja lataa kaikki tarvittavat tekniset tiedot talteen. Saatavilla on kuvia, asiakirjoja ja teknisiä tiedostoja.

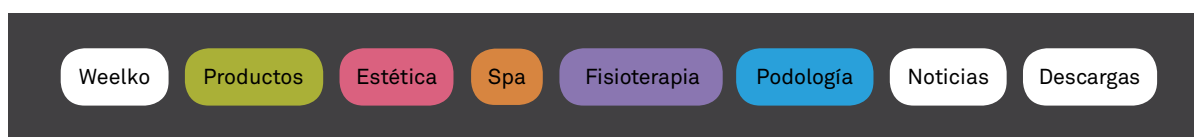

Laita päälle WEELKO TV osoitteessa weelko.com ja tutustu tarkemmin **Tensor**-tuoliin. Koska kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa!



vimeo

You Tube



MAAHANTUOJA
Nordic Esthetique Trading Oy
Satakunnankatu 28
33210 TAMPERE

MYYYJÄ
Verkkokauppa Esthetique Hoitolasi - 24/7 -
Email myynti@hoitolasi.fi
GSM +358451792031 FI
www.hoitolasi.fi