

TERMEPACK LÄMPÖPAKKAUSKATTILA

Lämpöpakkauskattila on tarkoitettu käytettäväksi lämmönsiirtopakkausten ja Hotpacks lämpöpakkausten lämmittämiseen pintalämpö- ja savihoitoja varten.

Käyttöohje:

- Lämpöpakkauskattilaan kaadetaan vettä ja lämmitettävät pakkaukset laitetaan kattilaan. Lämpöpakkausten tulee olla kokonaan vedessä. Vedenpinnan tulee kuitenkin jäädä noin 5 cm kattilan yläreunan alapuolelle.
- Lämpöpakkauskattilan termostaatti kierretään halutun lämpötilan kohdalle lämpöpakkaukset ja lämmönsiirtopakkaukset noin 60 astetta.
- Kun lämpöpakkauskattila kytketään päälle, punainen merkkivalo syttyy ja palaa kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Termostaatti säilyttää lämpötilan haluttuna.

TERMEPACK -Lämpöpakkauskattilan pistokkeeseen kannattaa laittaa kellokytkin, joka katkaisee virran yöksi. Tämä säästää lämpöpakkauksia ja sähköä.

Hoito-ohjeet:

- täytä vain kylmällä vedellä
- vaihda vesi kerran viikossa
- pese kattila käyttämällä pehmeää pesusientä ja tippa tiskiainetta, huuhtele
- älä käytä metallisia välineitä pakkausten nostamiseen.

Huom.

TERMEPACK – lämpöpakkauskattilaa puhdistettaessa ja huollettaessa on pistotulppa aina irroitettava pistorasiasta. Kattilaa ei saa upottaa veteen.